


# Klinický refraktometr - návod k použití:

1. odeberte krev z jugulární žíly telete ve věku 2-6 dní
2. nechte krev odstát do druhého dne v pokojové teplotě
3. odeberte sérum (tekutina, která zůstane po vysrážení)
4. kapku séra aplikujte na plochu refraktometru při 20°C
5. podívejte se do refraktometru proti světlu
6. pokud je potřeba zaostřete přístroj jako dalekohled
7. na stupnici vlevo vidíte celkovou bílkovinu v g/100ml
8. tuto hodnotu vynásobte 10x a máte hodnotu v g/l
9. správně napojené tele musí mít více než 55g/l

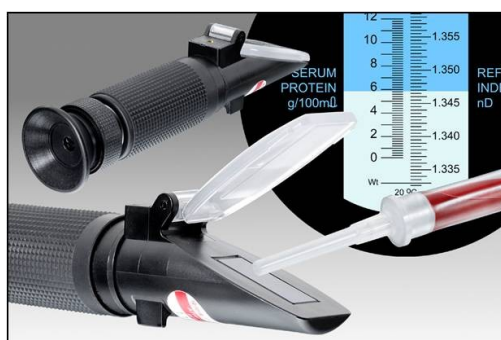

Potřebujete více informací?

MVDr. Martin Vlček

Tel.: 775 972 909

[www.vetvlcek.cz](http://www.vetvlcek.cz)